

MASQUE EN COTON BIO 30 LAVAGES INDISPENMASQUE

FINITION COUSUE - AVEC OPTION ATTACHE ARRIÈRE

Masque de protection à usage non-sanitaire de catégorie 1 (UNS 1) selon la note interministérielle du 29/03/2020 et répondant à la spécification de l'AFNOR S76-001.

Conformément au protocole d'essai décrit dans le document de la DGA du 25 mars 2020, ce masque répond aux exigences de la catégorie UNS 1, soit un masque à usage des professionnels en contact avec le public.

Efficacité de filtration des particules : 90% même après 30 lavages.

Respirabilité (perméabilité à l'air à dépression de 100 Pa):

192 litre/m²/s minimum (pour 96 requis). Test au porté établi par le fabriquant: 4 heures consécutives maximum.*

* Test de la Direction Générale de l'Armement:

RP/20-2208 du 08/04/20 et RP/20-2816 du 23/04/20.



LAVAGE ET ENTRETIEN



- Laver à **60°C CYCLE COURT** (≥ 30 min), dans un filet à linge, avec détergent classique avant le premier usage et après chaque utilisation (dès qu'il est retiré ou bien au bout de **4h** d'utilisation continue maximum). Essorage à 1000 tr/min maximum.



- A la fin du cycle de lavage, étirer le masque dans les 2 sens pour le redimensionner avant son séchage.



- Laisser sécher à l'air, à plat ou suspendu. Le séchage doit durer moins de 2 heures.



- Repasser délicatement sans écraser le tissu sur les deux faces entre 120/130° C, c'est à dire entre les points 1 et 2 du fer à repasser.

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Un premier cycle d'entretien est requis avant 1er usage (cf. Utilisation ci-dessous).
- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche, votre nez et votre menton.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.

UTILISATION

Insertion de la barrette métallique

Au niveau de l'angle, « **frotter** »
entre vos doigts le masque
pour repérer l'ouverture.




Masque cousu

par nos soins
pour éviter l'effilochage

(si l'ouverture est difficile, nettoyer les bords
en les recoupant aux ciseaux)

Cette barrette est à enlever avant
le lavage de votre masque.

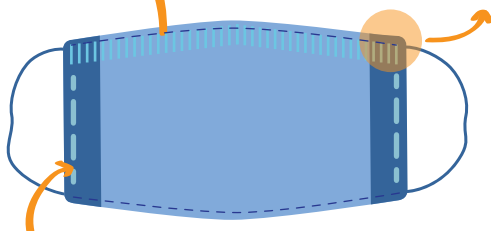

Pour attacher le masque derrière la tête (option 2 et 3 ci dessous),
clipser les élastique dans les attaches prévues à cet effet.

3 MANIÈRES DE PORTER VOTRE MASQUE



1



2



3

PORT DU MASQUE



a



b



c



d

Avant toute manipulation du masque se laver les mains à l'eau et au savon

- a- Saisissez le masque par les élastiques et placez le derrière chaque oreille. Ajustez sa position afin qu'il recouvre nez, bouche et menton.
- b- Ajustez la barrette métallique du centre vers les extérieurs.
- c- L'Indispenmasque doit être porté au maximum 4h et doit être changé dès que vous ressentez de l'humidité.
- d- Retirer le masque en le tenant par les élastiques et le placer dans un sachet hermétique. A jeter, propre, en fin de vie.

COMPOSITION:

48% coton Bio, 27% polyester, 9% coton, 8% polyester recyclé,
6% coton recyclé, 1% Elasthane;



Fabrication : Les Tissages de Charlieu

Références : LTC-MDC-54198 & LTC-MDC-54199 selon la note
d'information interministérielle révisée le 26/04/20

Distribution : Parle Objet (www.parle-objet.com)

Société JBP CREATIONS